




# e-patch

GUIDE BÊTA-TESTEUR iOS


# RECEVOIR L'APP E-PATCH

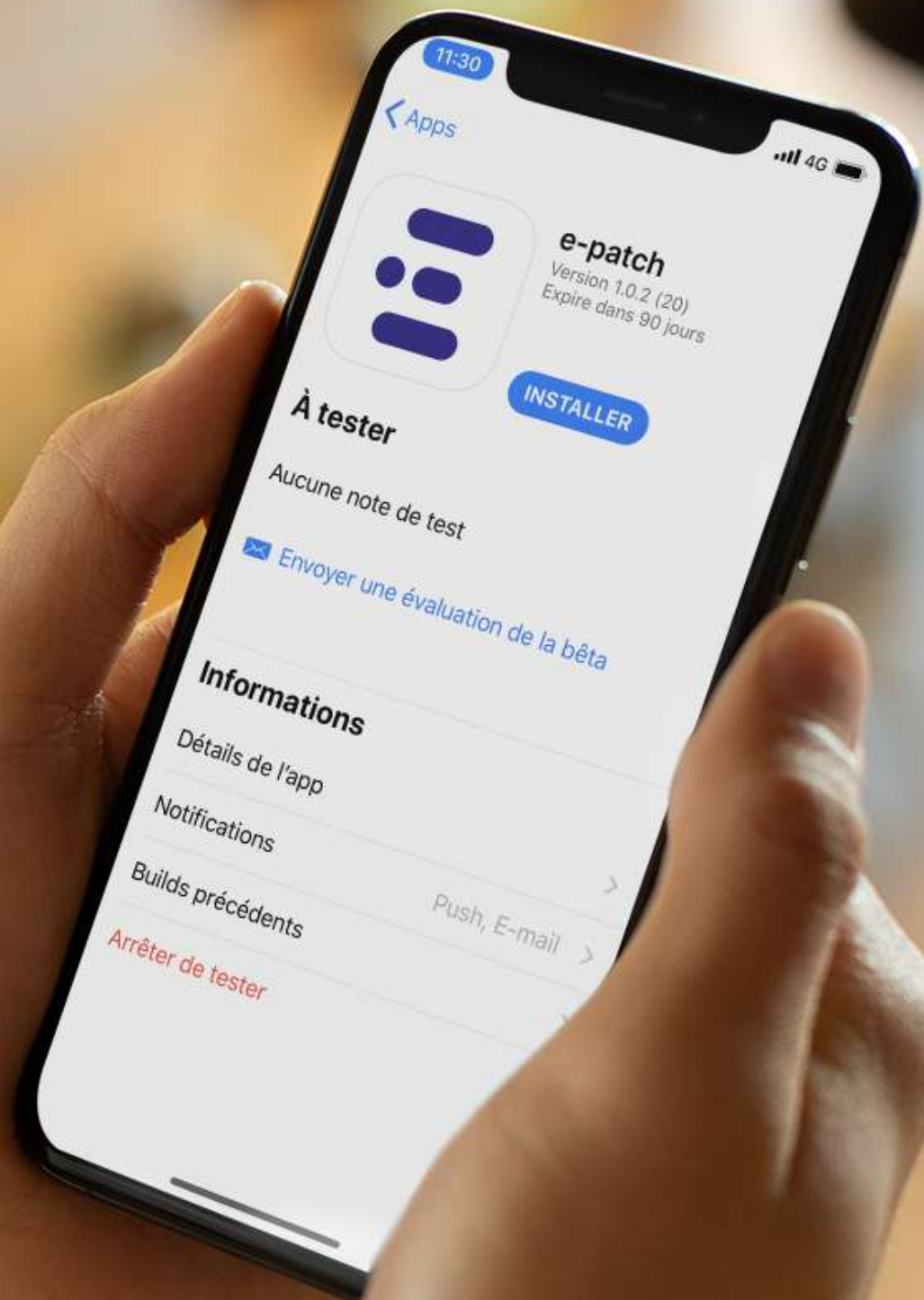

Pour tester notre application en avant-première, il va falloir suivre les quelques étapes décrites ci-après.

1

## Réception de l'invitation

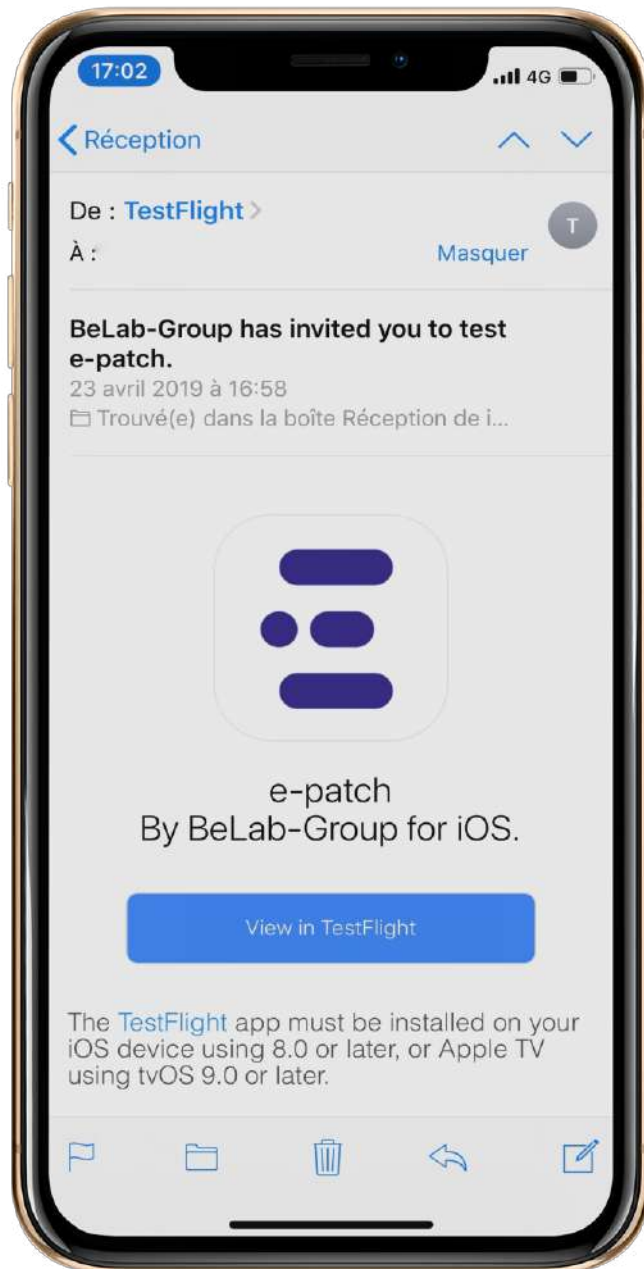

Vous recevrez une invitation par e-mail contenant 2 liens.

1) Le lien vous permettant de télécharger l'application **TestFlight**.

2) Le lien vous permettant de télécharger l'application **e-patch** depuis TestFlight.

# 2

## Téléchargement de TestFlight



Installez l'application **TestFlight** depuis l'App Store grâce au premier lien communiqué par e-mail. A partir de celle-ci vous pourrez télécharger la version bêta de l'**application e-patch** ainsi que ses mises à jour.

4

## Téléchargement l'application e-patch



Téléchargez l'**application e-patch** grâce au deuxième lien communiqué par e-mail. Celui-ci vous redirigera vers **TestFlight** et lancera le téléchargement. En cliquant sur l'icône de l'application, vous pourrez avoir plus de détail sur les mises à jour. Vous pourrez également **évaluer** l'application et **proposer des axes d'amélioration** pour l'e-patch et son application.


# UTILISER L'APPLICATION E-PATCH



Vous êtes prêt pour l'expérience e-patch.  
L'application d'un côté, le patch de l'autre.  
Préparez-vous pour votre première séance de  
sport 3.0.

1

## Inscription

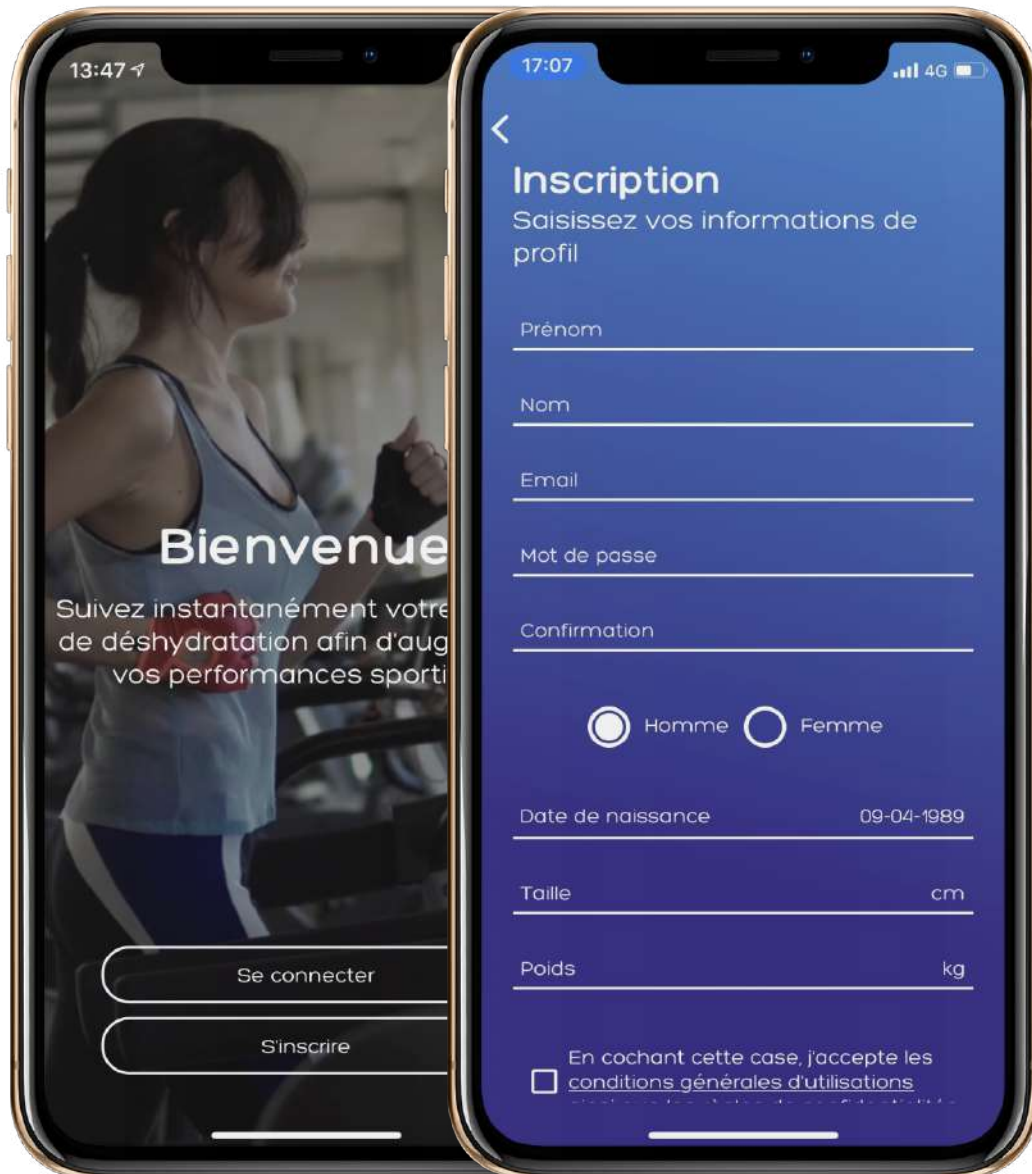

Ouvrez l'**application e-patch** et cliquez sur « S'inscrire ». Renseignez ensuite les champs nécessaires demandés pour parfaire la mesure de vos pertes hydriques et caloriques.

2

## Validation du compte




Une fois que vous avez rempli et envoyé le formulaire, vous recevrez un e-mail contenant un **lien de validation**. Cliquez sur celui-ci afin de confirmer votre inscription.



3

## Connexion

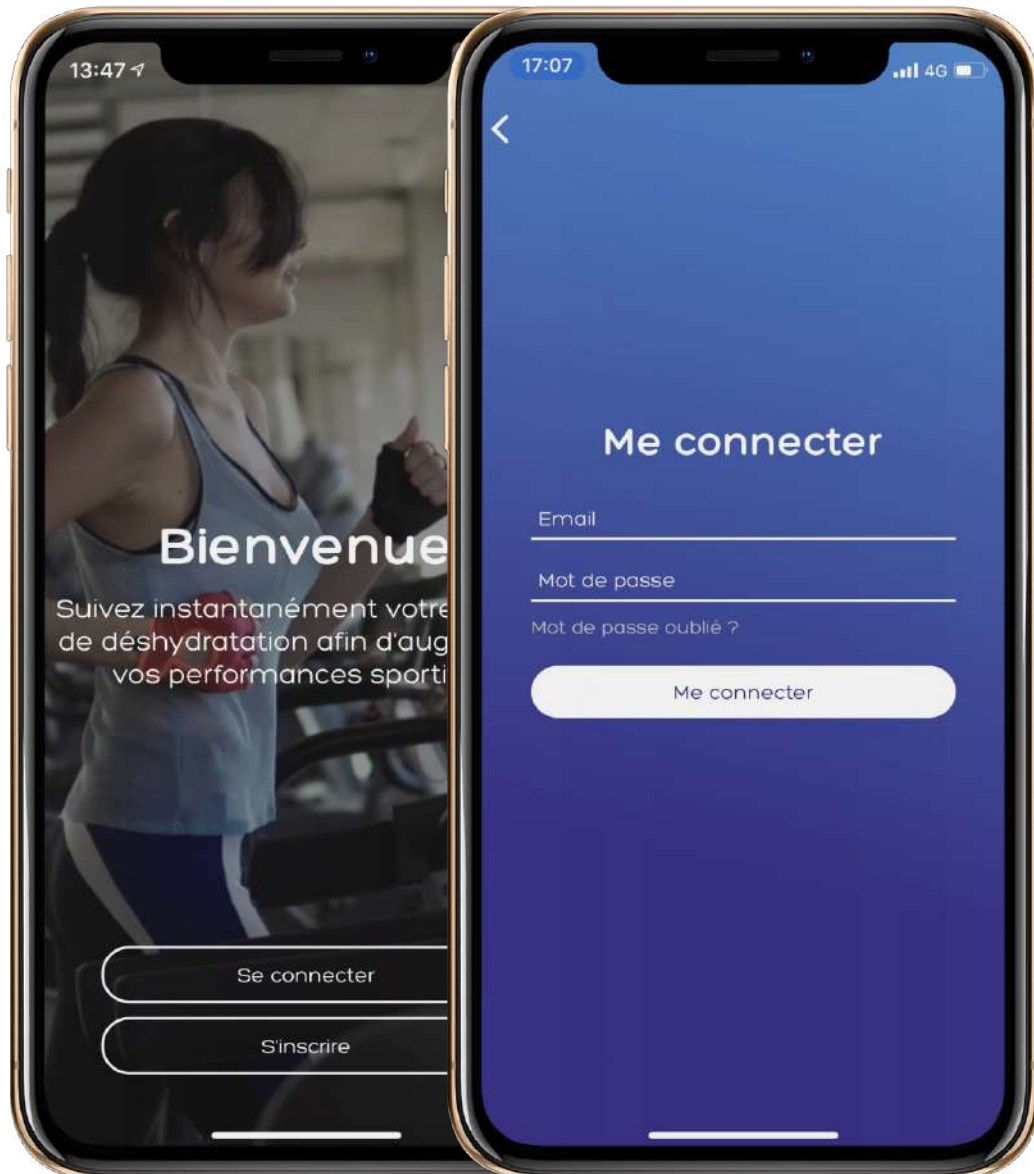

Cliquez sur « **Se connecter** » puis renseignez vos identifiants. Lors de votre première connexion, un tutoriel vous expliquera le fonctionnement de l'e-patch et de son application.

4

## Page d'accueil




Vous voici sur la page d'accueil.

Depuis le menu principal, vous pouvez lancer la calibration de votre e-patch en cliquant sur « Nouvel e-patch », modifier vos informations dans la section « profil » ou encore accéder à l'historique des données.

5


## Placement de l'e-patch

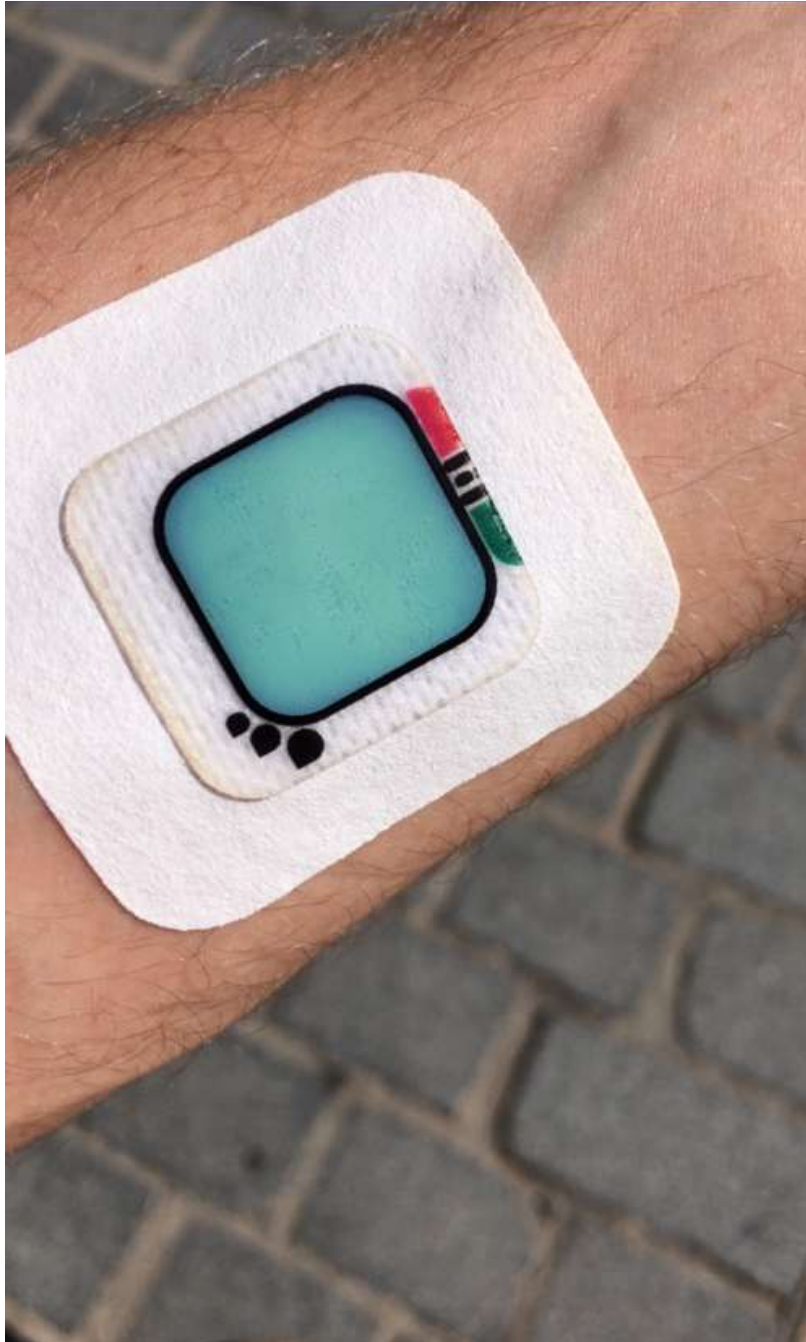

Retirez le film autocollant au dos de votre e-patch puis placez-le sur votre avant-bras comme indiqué dans le tutoriel. Appliquez une légère pression sur votre e-patch et sur la jupe qui l'entoure afin de maximiser son adhérence.

6

## Initialisation de l'e-patch

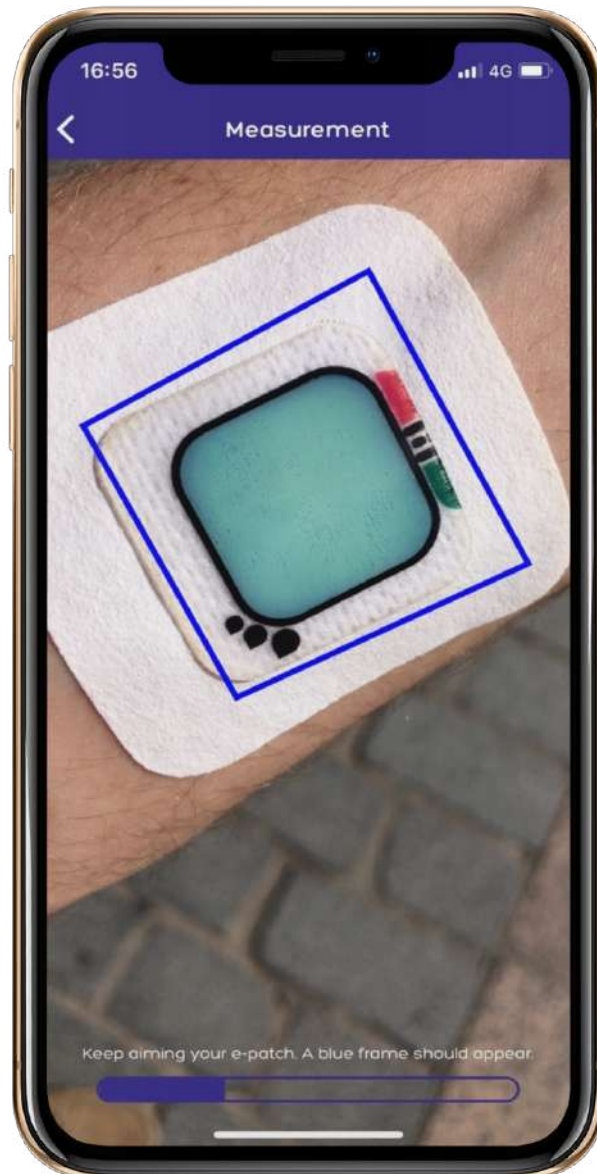


Depuis le menu principal, cliquez sur « **Nouvel e-patch** » puis scannez votre e-patch **avant le début de votre séance sur avant-bras sec (avant transpiration)** afin de le **calibrer**.

**Important :** Pour tous les scans (calibration, mesure, retrait du patch), veillez à réunir des conditions optimales à la bonne lecture de l'e-patch (éviter les reflets, les artefacts, ou tout autre élément susceptible d'entraver la bonne lecture).

# 7

## Nouvelle mesure

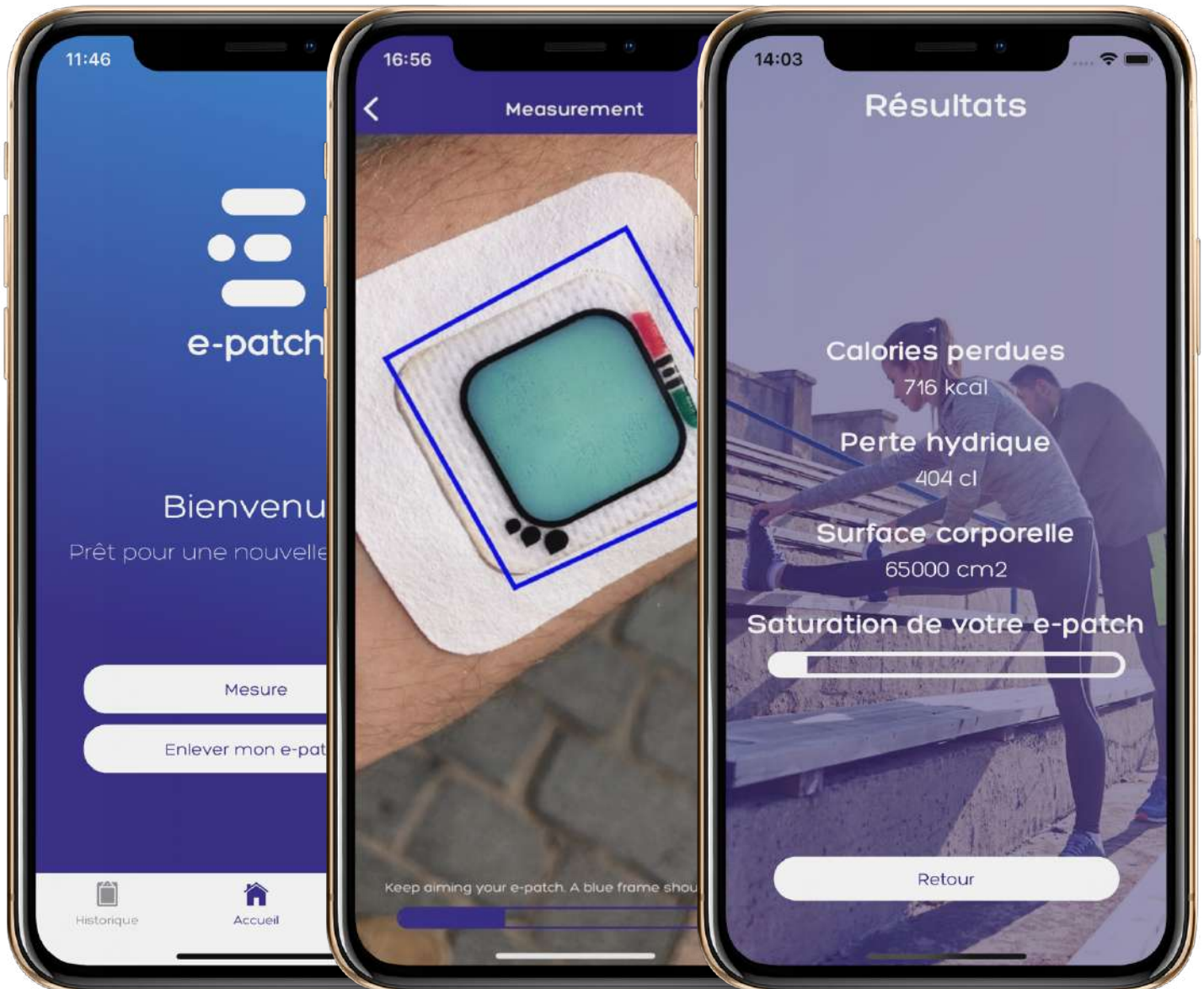

Après la calibration, vous pouvez commencer votre séance. Scannez votre e-patch autant de fois que vous le souhaitez (ex. Après chaque exercice ; tous les 5 km ...) en cliquant sur « **Mesure** ».

Vos résultats seront analysés puis affichés sur votre smartphone. A la fin de votre séance, votre corps continue de dissiper la chaleur pendant 20 à 30 minutes, veuillez laisser votre patch pendant ce délai avant de cliquer sur « **enlever mon patch** » pour avoir la dernière mesure de votre e-patch.

# 8

## Voir l'historique



Depuis l'accueil, vous pouvez accéder au menu « **historique** ».  
Vous pourrez observer la liste des mesures que vous avez effectué.

Astuce : glissez vers le bas pour mettre à jour.

Remarque : Cette fonctionnalité est encore en cours de développement.

# 9

## Modifier votre profil



Le menu "profil" vous permet de modifier vos informations personnelles, de vous déconnecter ou de supprimer votre compte e-patch.

Astuce : Selon vos objectifs, votre poids peut-être amené à évoluer. N'hésitez pas à mettre à jour régulièrement cette information afin de garantir la précision des résultats.

# 3, 2, 1 ... PATCHEZ !



Pour toute questions ou suggestions, consultez le site [e-patch.eu](https://e-patch.eu) ou contactez nous par e-mail à l'adresse [support@e-patch.eu](mailto:support@e-patch.eu)